

Chaque lecteur OneTouch® est conçu pour que vous puissiez facilement tester votre glycémie et pour vous aider à prendre en charge votre diabète.

Étape
1

Insérez une bandelette de test OneTouch Verio®



Étape
2

Appliquez le sang de n'importe quel côté de la bandelette



Et le tour est joué...
 Vos résultats apparaissent à l'écran. Notre technologie ColourSure® vous montre instantanément si vos résultats de glycémie sont **dans l'objectif ou à l'extérieur de l'objectif**



Connectez-vous à l'**appli OneTouch Reveal®** pour obtenir encore plus de renseignements donnant un meilleur aperçu. Voir au verso.

Lisez toujours l'étiquette et suivez le mode d'emploi. Les décisions de traitement doivent être fondées sur le résultat numérique et la recommandation d'un professionnel de la santé; elles ne doivent pas s'appuyer exclusivement sur la position du résultat par rapport à la plage d'objectifs (seuils Hypo/Hyper).

© 2020 LifeScan IP Holdings, LLC. CA-VRF-2000074

ONETOUCH®

Synchronisation harmonieuse des données de votre lecteur OneTouch® directement dans votre téléphone intelligent. Pour commencer...

1. Téléchargez l'appli OneTouch Reveal® GRATUITE

- Visitez la boutique d'applications de votre appareil mobile et cherchez « **OneTouch Reveal** », puis installez l'appli



2. Activez la fonction Bluetooth® de votre lecteur OneTouch®

Si vous utilisez le lecteur OneTouch Verio Reflect^{MC} :

- Allumez votre lecteur. Appuyez sur le bouton (OK) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran de démarrage apparaisse
- Allez au menu Réglages > sélectionnez et activez la fonction Bluetooth®

Si vous utilisez le lecteur OneTouch Verio Flex® :

- Appuyez sur le bouton (OK) pour mettre votre lecteur en marche
- Appuyez simultanément sur les boutons (OK) et (A) pour activer la fonction Bluetooth®



Bluetooth®

N'oubliez pas d'activer aussi la fonction Bluetooth® de votre appareil mobile.

3. Établissez la connexion

- Activez l'appli OneTouch Reveal® sur votre appareil mobile et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran
- Lorsque l'appli le demandera, entrez le NIP qui s'affiche à l'écran de votre lecteur dans votre appareil mobile et touchez **Jumeler**



Vous pouvez également consulter votre compte à partir de votre ordinateur en allant sur le site OneTouchReveal.ca

12 3456

Exemple de NIP

Vous pouvez maintenant effectuer des tests et synchroniser vos données!

(Facultatif) Partagez vos données avec votre équipe soignante

- Une fois la configuration terminée, touchez **PLUS** et sélectionnez **Connexions**
- Touchez **Ajouter une clinique** et entrez le **Code de la clinique** que votre équipe soignante vous a remis et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran

Entrez le code de la clinique

--	--	--	--	--	--

Pour en savoir plus, consultez le site OneTouch.ca/fr ou composez le **1-800-663-5521**.

Apple et le logo d'Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Les logos et le mot servant de marque Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par LifeScan Scotland Ltd. et ses sociétés affiliées s'effectue sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2020 LifeScan IP Holdings, LLC. Tous droits réservés. CA-VRF-2000074

ONETOUCH®